



EMPAREJANDO SU KETO-MOJO® MEDIDOR GK+ CON SU MÓVIL DISPOSITIVO CON BLUETOOTH



El emparejamiento permite que su medidor GK+ de glucosa en sangre y de β -cetona Keto-Mojo® y su dispositivo móvil se comuniquen entre sí.

Las instrucciones para emparejar su medidor con la aplicación Keto-Mojo® iOS y Android se pueden encontrar escaneando el código QR a continuación o escribiendo el siguiente enlace web en una nueva pestaña del navegador.

➔ <https://keto-mojo.com/bluetooth-app-connection/>

Siga las pautas e instrucciones para emparejar con éxito el medidor con la aplicación Keto-Mojo®

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Consulte el Manual del usuario para obtener detalles sobre la limpieza y desinfección adecuadas. Tenga en cuenta que todas las partes del sistema aún pueden transmitir enfermedades infecciosas de los patógenos transmitidos por la sangre, incluso después de la limpieza y desinfección.



ACTIVA SU GARANTÍA POR VIDA
REGÍSTRATE AHORA: keto-mojo.com/warranty

¡EMPIEZA AHORA!

¡Tenemos recursos útiles, que incluyen artículos, recetas y más!

Keto-Mojo.com



Aprenda como evitar errores comunes y obtener respuestas a las preguntas más frecuentes: keto-mojo.com/help-center



Los videos cortos son una excelente manera de comenzar:
En línea: keto-mojo.com/topics/how-to-series



Obtenga información sobre la funcionalidad de la aplicación y la solución de problemas:
keto-mojo.com/help-category/bluetooth-meter-functions-app



¿Tienes preguntas o comentarios? Póngase en contacto con nuestro amable y experimentado Servicio de atención al cliente:
En línea: keto-mojo.com/contact-us
En línea: support@keto-mojo.com
Teléfono: 1 (800) 513-1965

Manufacturado por: KETO-CHECK, INC. 952 School St. Suite 212 Napa, CA 94559-2824 Tel: 800.513.1965 • 10am-4pm PST

Para asistencia fuera de este horario, comuníquese con su profesional de la salud.

©2020 Keto-Check, INC.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte el Manual del usuario para obtener información completa sobre solución de problemas y errores, o póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Keto-Mojo® para obtener más ayuda.

ERROR	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
E 1	La sangre o la solución de control se aplicó a la tira reactiva antes de que apareciera en la pantalla un indicador de una gota parpadeando	Desechar la tira reactiva que esté utilizando y repetir la prueba con una nueva. Espere hasta ver en la pantalla el indicador de una gota parpadeando antes de realizar la prueba.
E 2	El medidor detecta que está utilizando una tira usada o contaminada.	Desechar la tira reactiva que esté utilizando y repetir la prueba con una nueva. Espere hasta ver en la pantalla el indicador de una gota parpadeando antes de realizar la prueba.
E 3	Tira reactiva inadecuada.	Desechar la tira reactiva que esté utilizando y repetir la prueba con una nueva. Asegúrese de que está utilizando una tira reactiva de glucosa y β -cetona de Keto-Mojo®.
E 4	Muestra inadecuada.	Deseche la tira reactiva y repita la prueba con una nueva. Asegúrese de estar usando una muestra de sangre o una solución de control de glucosa en sangre Keto-Mojo®, o de β -cetona en sangre Keto-Mojo®.
E 5	Temperatura fuera del rango.	Desplazarse a un lugar que esté dentro del rango de funcionamiento del medidor. Deje que el medidor se ajuste a esta temperatura durante 20 minutos antes de realizar una prueba.
E 6 E 7	Existen problemas potenciales con el hardware.	Saque la batería y reinicie el medidor. Si el problema continúa, comuníquese con Atención al cliente de Keto-Mojo al 1 (800) 513-1965, de lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m. PST o envíe un correo electrónico support@keto-mojo.com
E 10	Muestra insuficiente.	Saque la tira reactiva, repita la prueba y aplique suficiente muestra para llenar la ventana de verificación de la tira reactiva.
E 11	Indicación de pilas bajas.	Reemplace las pilas. Abra el compartimento de las pilas ubicado en la parte de atrás del medidor y retire y reemplace las pilas AAA.
HI	El resultado de la prueba de glucosa en sangre es superior a 600 mg/dL; El resultado de la prueba de β -cetona en sangre es superior a 8,0 mmol/L.	Lávase y séquese bien las manos y la zona donde se realiza la prueba. Repita la prueba utilizando una tira reactiva nueva. Si el resultado sigue mostrando un HI parpadeante, póngase en contacto con su profesional de la salud lo antes posible.
LO	El resultado de la prueba de glucosa en sangre es inferior a 20 mg/dL; El resultado de la prueba de β -cetona en sangre es inferior a 0,1 mmol/L	Lávase y séquese bien las manos y la zona donde se realiza la prueba. Repita la prueba utilizando una tira reactiva nueva. Si el resultado sigue mostrando un LO parpadeante, póngase en contacto con su profesional de la salud lo antes posible.



Sistema de Monitoreo GK+
de Glucosa en Sangre y β -Cetona

GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA



Lea el Manual del usuario para obtener instrucciones completas antes de realizar una prueba.

Número: 1205098602
Fechas de efectivo: 2020-07-28

PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN

Para sacar muestras de la punta de los dedos, ajuste la penetración de profundidad para reducir las molestias. Antes de la prueba, limpie el sitio de prueba con una almohadilla con alcohol o use agua jabonosa. Séquese bien las manos y el sitio de prueba.

1 Desenrosque la cubierta del dispositivo de punción de su estructura principal. Inserte una lanceta estéril en el dispositivo de punción.



2 Mantenga la lanceta con firmeza en el dispositivo de punción y gire la lengüeta de seguridad de la lanceta hasta que se afloje, tras lo cual tire de la lengüeta de seguridad para sacarla de la lanceta. Guarde la pestaña de seguridad para desechar la lanceta usada.



3 Atornille cuidadosamente la tapa nuevamente en el dispositivo de punción. Evite el contacto con la aguja expuesta. Asegúrese de que la cubierta esté completamente sellada en el dispositivo de punción.



4 Ajuste la profundidad de punción girando la cubierta del dispositivo de punción. Hay varias configuraciones diferentes de profundidad de punción. Para reducir las molestias, use la configuración más baja que todavía produce una gota de sangre adecuada.



AJUSTES:

- 1 Para piel delicada
- 2 & 3 Para piel normal
- 4 & 5 Para piel gruesa o con callosidades



5 Tire del cañón de armado en la parte inferior del dispositivo. Es posible que escuche un clic para indicar que el dispositivo de punción ahora está cargado y listo para obtener una gota de sangre.



REALIZANDO UNA PRUEBA DE GLUCOSA Y CETONA EN SANGRE

1 Tire del cargador de resorte en la parte inferior del dispositivo.

2 Retire una tira reactiva de la bolsa e inserte la tira reactiva (color hacia arriba) en el medidor en la dirección que indican las flechas. El medidor se enciende automáticamente.



3 El medidor estará listo para probar si aparece un símbolo de una gota de sangre parpadeante.

4 Presione el dispositivo de punción contra el sitio de punción con la cubierta del dispositivo apoyada sobre la piel. Presione el botón de liberación para pinchar el sitio de punción.



5 Una vez que se ha formado la gota de sangre redonda, toque inmediatamente la punta de la tira reactiva con la gota de sangre hasta que el canal de sangre esté lleno y escuche un pitido. La sangre se introduce en la punta de la tira reactiva mediante acción capilar. No coloque sangre encima de la tira reactiva.



6 Una vez que la sangre se introduce en el canal, el medidor realiza una cuenta regresiva de 5 a 1 para la glucosa en sangre y de 9 a 1 para la β -cetona en sangre.



El resultado de su prueba se muestra automáticamente y se almacena en la memoria del medidor.

Vea abajo los ejemplos:



Lectura de glucosa cuenta regresiva de 5 segundos



Lectura de glucosa en mg/L



La lectura de cetona cuenta desde 9 segundos



Lectura de cetona en mmol/L

MIDA AMBOS GLUCOSA Y CETONAS CON EL MEDIDOR GK+ DE GLUCOSA EN SANGRE Y B-CETONA KETO-MOJO®

BOTONES LATERALES

Alternar entre varias funciones y configuraciones.

BOTÓN DE ENCENDIDO

Presione para encender/apagar el medidor. Use para cambiar entre funciones y establecer configuraciones.



PUERTO DE LA TIRA REACTIVA

Inserte una tira de prueba en el puerto de la tira en la parte superior del medidor.

La luz del puerto de la tira se enciende automáticamente cuando el medidor está encendido.

PANTALLA

Muestra resultados de pruebas, mensajes e información relacionada.

PUERTO DE LA TIRA REACTIVA

Presione el botón hacia arriba para expulsar la tira del medidor



PILAS

Requiere 2 pilas AAA. (Incluidas)

LANCETA SIMPLE



DISPOSITIVO DE PUNCIÓN



TIRA REACTIVA



EXTREMO DE LA MUESTRA

